

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hettich.nt-rt.ru> || hce@nt-rt.ru

Гематокритная центрифуга Haematokrit 200



Описание

Компактная гематокритная центрифуга Haematokrit 200 от компании Hettich является быстрым и эффективным прибором для определения объема красных кровяных клеток в крови с последующим вычислением соотношения объемов форменных элементов и плазмы крови (гематокритная величина). Таким образом, центрифуга может быть использована для получения крови для фотометрического определения содержания билирубина плазмы.

Haematokrit 200 — высокопроизводительная центрифуга, при наивысшей центробежной силе 16.060xg плотность красных кровяных клеток достигает максимального значения менее чем за 7 минут. До 24 капилляра можно центрифугировать в один прогон. Благодаря сегментированному ротору, каждая капиллярная трубка имеет свою камеру для обеспечения безопасности, при поломке одного из капилляров исключено возникновение цепной реакции. Стеклоосколки и кровь из разбитой капиллярной трубки фиксируются в подушке на внешней

стороне сегмента. Это также служит опорой для капиллярной трубки, к тому же легко моется и заменяется.

Значение гематокрита может быть считано после завершения оседания с помощью крышки ротора, которая служит для оценки полученного показателя. Это экономит время и обеспечивает дополнительную безопасность, так как нет необходимости удаления капиллярных трубок для этой цели.

Преимущества Hettich Haematokrit 200

- быстрые результаты благодаря высокому центробежному ускорению;
- 24 капиллярные трубки можно центрифугировать в один прогон;
- надежное, безопасное центрифугирование благодаря уникальной конструкции ротора;
- экономия времени и простота определения гематокрита: значение гематокрита можно легко высчитать с помощью крышки ротора;
- в дополнение к 24-местному ротору (в комплекте) для стандартных капиллярных трубок имеется 20-местный ротор для количественного анализа светлого сгустка крови (оба ротора снабжены крышками).

Комфорт

- эргономичная панель управления: легкая и быстрая установка времени и скорости центрифугирования;
- отображение оборотов в минуту и оставшегося времени центрифугирования в течении работы устройства.

Безопасность

- блокирование крышки во время работы;
- механизм фиксации крышки;
- аварийное открытие крышки;
- камера центрифуги изготовлена из металла;
- прекращение работы при дисбалансе.

Дизайн

- прочный металлический корпус;
- внутренняя крышка из металла;
- глубокая металлическая камера для безопасного размещения ротора.

Область применения Hettich Haematokrit 200

- определение гематокрита для диагностических целей: гематология;
- спортивная наука: определение гематокрита для проведения допинг-тестов;
- неонатальная наука: подготовка образцов для фотометрического определения билирубина в крови новорожденных детей.

У нас можно купить Hettich Haematokrit 200 гематокритную центрифугу с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Спецификация

Наименование	Значение
Сетевое напряжение ($\pm 10\%$)	200-240 V 1~

Частота сети	50-60 Hz-
Общая потребляемая мощность	270 VA
Потребление тока	1.3 A
Максимальный объем загрузки, миллилитров	24×2,2
Допустимая плотность, кг/дм3	1,2
Частота вращения (RPM), оборотов/минута	13000
Ускорение (RCF)	16060xg
Кинетическая энергия	950 Nm
Класс защиты прибора	I
Излучение помех, помехозащищенность	EN / IEC 61326-1, класс B
Уровень шума (зависит от ротора)	≤ 57 dB(A)
Размеры (Ш x Д x В), миллиметров	261×353×228
Вес, килограмм	ок. 10
Условия окружающей среды (EN / IEC 61010-1)	
Место установки	только в помещениях
Высота	до 2000 метров над уровнем моря
Температура окружающей среды	2°C до 40°C
Влажность воздуха	максимальная относительная влажность воздуха 80% для температур до 31°C, линейное понижение до 50% относительной влажности воздуха при 40°C
Категория перенапряжения (IEC 60364-4-443)	II
Степень загрязнения	2

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Ижевск (3412)26-03-58 Иваново (4932)77-34-06 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сыктывкар (8212)25-95-17 Сургут (3462)77-98-35 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31		